

Odběr vzorků pro HPV DNA

Základní informace

Speciální odběrová sada RCCM (Roche Cell Collection Medium)




RCCM zkumavka pro:

- uchování a transport odebraných buněk pro testování HPV DNA (cobas® HPV test)
- přípravu PAP cytologických preparátů
- vyšetření cytologie pomocí CINtec® PLUS

Kartáčový štěteček pro stěr z děložního hrdla

Odběr vzorku

ODBĚR

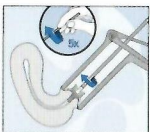


Vložte štěteček do hrdla děložního.

Jemně tlačte a otočte štětečkem 5x ve směru hodinových ručiček.

Vyjměte štěteček z genitálií.

OPLACH

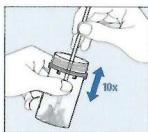

Co nejrychleji opláchněte štěteček v roztoku odběrové zkumavky.

Zatlačte ho 10x ke dnu zkumavky.

Důkladně štětečkem zatočte kvůli správnému uvolnění materiálu.

Štěteček poté vyhodte.

UZAVŘENÍ

Zašroubujte pečlivě a pevně horní víčko zkumavky.

Skladování a transport vzorku

Po odběru lze uchovávat buněčné vzorky ve zkumavkách RCCM při teplotách v rozsahu 15–30 °C po dobu až 6 měsíců od data odběru, což poskytuje laboratorům možnost archivace vzorků pro další testování.

Specifika odběru HPV DNA

Na co si dávat pozor

- Cíleně se zeptejte pacientky, zda používá:
 - lubrikanty (např. K-Y® Jelly)
 - vaginální gely (např. Metronidazol)
 Tyto přípravky mohou způsobit falešně negativní výsledky, proto je nutné minimalizovat jejich používání před odběrem testu HPV DNA.
- Další vaginálně používané přípravky (vaginální výplachy, pěny, antikoncepční gely) nemají vliv na výsledek testu HPV DNA.
- Na štítek lahvičky zaznamenejte požadované informace pacientky.
- Speciální odběrová sada RCCM je validována pro následující analyzátoři a systémy:

- cobas® 4800 HPV Test
- cobas® 4800 system
- cobas p 480
- cobas® 6800/8800

- CINtec® PLUS Cytology
- Hologic ThinPrep® T2000 system
- Hologic ThinPrep® T5000 system
- PAP cytologie

